



Auto Cure Activator™

ISO 9002



0473

Свойства

Химический активатор для использования с одностадийными стоматологическими адгезивами **Primabond 97™**, **Prima 2000™**, **Multibond™**, **One-Q-Bond™** и др.

Применение

Auto-cure activator™ применяется для самоотверждения одностадийных стоматологических адгезивов в случаях:

- ◆ постоянной фиксации коронок и мостовидных протезов
- ◆ пломбирования амальгамами
- ◆ невозможности применения светоотверждения

Комплектация

- ◆ 1 флакон **Auto-cure activator™**.
- ◆ Инструкция для пользователя.
- ◆ Иллюстрированная инструкция.

Срок хранения

Два года при температуре не выше 20°C (68°F).

Меры предосторожности

Auto-cure activator™ содержит ацетон и полимеризующиеся мономеры, которые могут вызвать аллергический дерматит у людей с повышенной чувствительностью кожи.

Избегайте попадания в глаза и на кожу.

В случае попадания тщательно промойте места контакта водой с мылом.

При наличии аллергии немедленно прекратить использование.

Хранить с плотно завинченной крышкой.

Инструкция по применению

1. Поместите в чистую чашечку равное количество адгезива и **Auto-cure activator™** и перемешайте в течении 2 секунд чистой микрокисточкой.
2. С помощью кисточки поместите нужное количество приготовленной смеси на подготовленную поверхность и оставьте на 15 секунд.
3. Удалите растворитель струей воздуха в течении 15 секунд или пока не прекратится движение раствора на поверхности.
4. Дальнейшую реставрацию осуществлять с помощью **High-Q-Bond Adhesive Resin Cement™** или любым другим композитом, полимеризующимся химическим или фотохимическим способом.