



Стекло-иономерный материал для фиксации

Применение

Закрепление коронок, мостов, ортодонтных деталей.

Инструкция по применению

Смешивание

Рекомендуемое соотношение порошка с жидкостью - 1 ложка порошка на 3-4 капли жидкости. Это соответствует соотношению 2.2 грамма порошка к 1.0 грамму жидкости. Для более жидкой консистенции не используйте весь порошок. Необходимое количество порошка и жидкости нанесите на бумагу для смешивания и пластиковым шпателем добавляйте необходимое количество порошка. Тщательно смешивайте в течении 20 секунд.

Примечание

Вы можете изменить рекомендованные пропорции, если посчитаете нужным.

При смешивании большого количества материала, разделите порошок на две равные части. Смешайте одну из частей со всей жидкостью в течении 5 секунд. Объедините полученную смесь с оставшимся порошком и тщательно смешивайте в течении 15 секунд (всего 20 секунд).

Техника фиксации

1. Приготовьте зуб в соответствии с клиническими требованиями.
2. Чистить поверхность только с пемзой и водой. Промокните, но не сушите. Не удаляйте смазочный слой.
3. Очистите и высушите внутреннюю поверхность приклеиваемой детали.
4. Смешайте необходимое количество материала.
5. Покройте реставрируемую поверхность 1 миллиметровым слоем материала и уплотните в течении 30 секунд. Не переполняйте. Высокая температура сокращает рабочее время.
6. Время процедуры от начала смешивания 4.5 минуты. Заканчивая процедуру, удалите остатки материала, защитите границы лаком или светоотверждаемой неполненной смолой.