



Эксклюзивный дистрибьютор в России: ООО "МЕДЕНТА"
123308 г. Москва, Новохорошевский проезд, 25, Тел./факс: 8 (499) 946-4610
Тел.: 8 (499) 946-4609, 946-3999, 191-1268, e-mail: shop@medenta.ru, www.medenta.ru

Темпфил

Затвердевающий в воде материал для временных реставраций

Рекомендуемое применение

Используется стоматологом в качестве материала для временных пломб

Противопоказания

Противопоказан для пациентов с гиперчувствительностью к затвердевающим в воде материалам для временных реставраций. В случае аллергии обратитесь к врачу.

Указания по применению

1. Просушите препарированную полость зуба при помощи ватного шарика (не пересушивать).
2. Нанесите необходимое количество материала "Темпфил" в полость при помощи соответствующего инструмента.
3. Попросите пациента надкусить пломбу, чтобы удалить излишек материала в случае полости Класса 1. Или же придайте пломбе форму, обращая внимание на границу прилегания к стенкам полости.
4. Удалите излишек при помощи влажного ватного шарика, совершая движения от центра пломбы к ее краям.
5. Поскольку данный материал затвердевает полностью только через час, попросите пациента избегать употребления пищи и воды в течение данного периода времени.
6. Извлечение пломбировочного материала можно осуществлять при помощи вращающихся инструментов или соответствующего ручного инструмента.

Примечания

- Закрывайте контейнер незамедлительно после извлечения необходимого количества материала.
- Не смешивайте с каким-либо другим материалом.

Хранение

Хранить при комнатной температуре в сухом месте (срок годности – 2 года).

Упаковка

- Баночка 40г в индивидуальной коробочке
- Размер коробочки: 35 x 35 x 36 мм